



Kolloidhõbeda ja hüaluroonhappe naatriumsoolaga pihusti

125 ml pihustus pudel, mis sisaldab 10 g pulbrit

Sihotstarve

Ajutine ravi mitteinfitseerunud nahakahjustuste korral (löikehaavad, marrastused, haavad, kerged põletused mis ei ole kahjustanud nahakihti, operatsioonijärgsed haavad, lamatisehaavandid, uriinipidamatuse ja mähkmete ärritus).

Tootekirjeldus

Farmactive Silver spray on pulbriline pihustusseade, mis sisaldab kolloidhõbedat ja hüaluroonhappe naatriumsoola. Kolloidhõbedal on antibakteriaalsed omadused, mis aitavad vältida haavasideme mikroobset saastumist ja hoida haavakeskkonda puhtana välistest bakteritest. Hüaluroonhape on polüsahhariid, mis asub loomulikult inimese keha sidekoes kus see täidab niisutavaid ja libestavaid funktsioone. Nahakahjustuste paranemisprotsessi ajal aitavad hüaluroonhappe niisutavad omadused kaasa rakkude füsioloogilisele liikumisele ning vees lahustuvate molekulide levikule. Hõbe ja hüaluroonhape on koostises koosluses kerge kaoliini ja ränidioksiidiga, millel on imavad omadused ja mis kontrollivad eritisi, luues soodsa mikrokeskkonna haava loomulikuks paranemiseks.

Koostis

Kolloidhõbe 2%, hüaluroonhappe naatriumsool 0,2%, kerge kaoliin, ränidioksiid, propellantide segu.

Kasutusjuhend

Enne kasutamist puhastage haav korralikult, loksutage pudelit hoolikalt ning seejärel hoidke pudelit püstises asendis u. 10cm kaugusel haavast ja pihustage piisav kogus haava pinnale, et kogu haav oleks kaetud. Pihustage lühikeste intervallidega, et hinnata toote kogust ja vältida pulbri hajumist õhku. Pärast pihustamist katke ala steriilse marliga või steriilse haavasulgemisribaga. Korda manustamist 1 või 2 korda päevas, vastavalt vajadusele ning eelnevalt nahakahjustust hinnates ja haava kasutuskordade vahel puhastades.

Kui pudel ajutiselt ummistub, raputage seda tugevalt või eemaldage plastventiil ja peske seda leige veega. Kuivatage ventiil ja asetage see uuesti pihustusotsikule.

Ettevaatusabinõud

Toode on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks, lokaalseks ja ajutiseks raviks. Soovitav on toodet kasutada mitte kauem kui 4 nädalat. Kui nahakahjustuse seisund ei parane või tekib infektsiooni, katkestage ravi koheselt ja konsulteerige arstiga. Kasutamise ajal vältige pulbri hajumist õhku ja ärge hingake pulbrit sisse. Ärge pihustage toodet näo lähedal ega näole.

Juhuslikul sissehingamisel või allaneelamisel konsulteerige arstiga. Vältige tootega töödeldud piirkondade kokkupuudet päikesevalgusega.

Kõrvaltoimed

Vahetult pärast toote kasutamist võivad esineda ajutised külma-, põletus- ja ärritusreaktsioonid, kuid ei põhjusta tagajärgi.

Vastunäidustused

Ärge kasutage toodet, kui teil esineb ülitundlikkus selle koostisosade suhtes. Raseduse ajal on soovituslik toodet kasutada ainult meditsiinilise järelevalve all.

Hoiatused

Eriti tuleohtlik aerosool.

Rõhu all olev mahuti: võib kuumutamisel õhkeda.

Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, lahtisest leegist või muudest süüteallikatest. Ära suitseta. Ärge torgake ega põletage isegi pärast kasutamist. Kaitsta päikesevalguse eest. Mitte pihustada lahtisele tulele ega muule süüteallikale. (Vältige elektrostaatiliste laengute tekkimist). Ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte sisse hingata ega alla neelata. Mitte kasutada infitseeritud haavadel, limaskestadel ega limaskestade läheduses (silmad, suu, kõrvad, suguelundid jne). Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada kui pakend on kahjustatud või pärast tootele märgitud kõlblikkusaega.

Ära kasuta toodet koos ainetega, mis sisaldavad kvartaarseid ammooniumisooli ja proteoolüütilisi ensüüme. Kõik tõsised õnnetusjuhtumid, mis on seotud meditsiiniseadmega, tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus see asub.

Säilitamine

Pärast kasutamist asetage kork tagasi. Hoida jahedas ja kuivas. Kaitske toodet päikesevalguse eest ning ärge jätke kuumuse ja lahtise leegi lähedusse ega üle 50°C temperatuuri kätte. Seade, mida on säilitatud terves originaalpakendis, kehtib kolm aastat alates valmistamise kuupäevast.

Utiliseerimine

Kõrvaldage seade vastavalt kehtivatele kohalikele jäätmealastele õigusaktidele.

MEDICAL DEVICE  0425



Manufactured by:
FARMAC ZABBAN SPA
VIA PERSICETANA, 26
CALDERARA DI RENO (BOLOGNA) - ITALY
www.farmaczabban.it

0992801000A

MADE IN ITALY

Issuing date 15/10/2021