



Meditsiiniline
nahahooldus

Anti Itch Care

Leevendab +
rahustab
sügelevat nahka

Kliiniliselt tõestatud
Hüpoallergeenne
Hormooni- ja
lõhnaainevaba


ALHYDRAN



BAPMEDICAL
MEDICAL CARE FOR THE SKIN



BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64,
NL-7336 AZ Apeldoorn
www.bap-medical.com
Made in Aruba

Product Nr. 20-31050



IFU-ALH-20-31050-004

WWW.ALHYDRAN.COM

EESTI

Nimetus:

ALHYDRAN Anti Itch Care meditsiiniline kreem naha jahutamiseks ning sügeluse aktiivseks vähendamiseks ja leevendamiseks.

Toote kirjeldus:

- Meditsiiniline kreem, millel on nahale kohene jahutav toime ning mis vähendab ja leevendab sügelust.
- Kreem tagab optimaalse ja kauakestva niisutuse, leevendab sügelust, jahutab ning rahustab nahka kohe.
- Sobib kõikidele nahatüüpidele ja nahaseisunditele, millega kaasneb sügelus.
- ALHYDRAN Anti Itch Care on hüpoallergeenne ega sisalda parabeene, lõhnaaineid ega hormone.

Koostisosad:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera Gel from Aruba), Aqua (Water), Decyl Oleate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Cetearyl Isononanoate, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Polysorbate 60, Cetareth-20, Menthyl Lactate, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Cetareth-12, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Tocopheryl Acetate (Vit.E), Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba Oil), Ascorbic Acid (Vit.C), Disodium EDTA.

Omadused:

- ALHYDRAN Anti Itch Care on niisutav meditsiiniline kreem, mille peamine koostisosa on värselt töödeldud aloe vera geel. Kuna see jahutav kreem sisaldab erakordselt suures koguses aloe vera geeli, on ALHYDRAN Anti Itch Care'il tugevad niisutavad omadused.
- Kreem niisutab nahka kogu päeva ning on rikastatud vitamiinide, looduslike õlide ja Menthyl Lactate'iga.
- Kõik koostisosad aitavad nahka rahustada ja jahutada ning sügelust leevendada.
- Menthyl Lactate'il on sama toime nagu mentoolil, kuid ilma mentooli allergeensete omadusteta.

NÄIDUSTUSED JA KASUTAMINE

Näidustused/kasutusvaldkonnad:

- Leevendab sügelust.
- Vähendab kratsimisvajadust.
- Jahutab nahka kohe.
- Toetab punetavat ja sügelevat nahka.
- Toetab ärritunud naha hooldust, kui soovitakse sügeluse leevendamist.
- Toetab ärritunud naha hooldust, kui soovitakse jahutavat toimet.

Kasutamishüüsed:

- Kandke ALHYDRAN Anti Itch Care'i õhuke kiht nahale nii sageli kui vaja. Parima tulemuse saavutamiseks kandke kreemi vähemalt kaks korda päevas.
- Veenduge enne kreemi pealekandmist, et nahk oleks puhas ja kuiv.
- ALHYDRAN Anti Itch Care'i võib kasutada pikema aja vältel.
- Kui pärast mõnenädalast kasutamist ei ole tulemus piisav, võtke ühendust nahaspetsialisti, näiteks nahaterapeudi, perearsti või dermatoloogiga.

Nõuanne: kui sügelus on tingitud ekseemiga seotud sümptomitest, kasutage ALHYDRAN Anti Itch Care'i koos ALHYDRAN Eczema Care'iga. Sellisel juhul võib ALHYDRAN Anti Itch Care'i kasutada täiendavalt.

OHUTUS JA SÄILITAMINE

Mitte kasutada, kui:

- teil on teadaolev allergia mõne koostisosa suhtes;
- teil on avatud haavad või õmbluste järgsed nahaperforatsioonid, mille korral nahk ei ole veel kokku kasvanud;
- nahk on infitseerunud;
- teil esineb krooniline lööve või ärritus;
- laps on alla 3 kuu vanune.

Erihoiatused:

- Hoida laste eest kättesaamatus kohas.
- Alla 6 kuu vanustel lastel kasutamisel konsulteerige esmalt arstiga.
- Ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Vältige otsest kokkupuudet silmade ja limaskestadega.
- Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või toode on avatud.

Kõrvaltoimed:

Seni ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid. Kõigist seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Säilitamine:

- Parim enne kuupäev on märgitud pakendile.
- Hoida temperatuuril alla 25 °C.
- Suure looduslike koostisosade sisalduse tõttu, sealhulgas värske aloe vera geel, võib toode pärast avamist veidi muuta värvust või konsistentsi. See ei mõjuta kreemi nõuetekohast toimimist.

Läbivaatamise kuupäev:

september 2020