



Meditsiiniline
nahahooldus

Kuiva lõhenenud naha

hooldus
Taastab ja leevendab
(väga) kuiva
nahka

Kliiniliselt tõestatud
Hüpoallergeenne
Hormooni- ja
lõhnaainevaba



ALHYDRAN

EESTI

Nimetus:

ALHYDRAN Cracked Dry Skin Care
meditsiiniline kreem (väga) kuiva naha
taastamiseks, toitmiseks ja pehmendamiseks.

Toote kirjeldus:

- Meditsiiniline kreem, mis toidab (väga) kuiva
nahka kohe pärast pealekandmist. Nahk
muutub taas elastseks ja tunneb end pikema
aja jooksul mugavalt.
- Kreem tagab optimaalse ja kauakestva
niisutuse, pehmendab nahka, vähendab
ketendust ning rahustab nahka koheselt.
- Sobib kõikidele nahatüüpidele ja
nahaseisunditele, mille korral esineb kuiv
kuni väga kuiv nahk, mis vajab intensiivset
hooldust.
- ALHYDRAN Cracked Dry Skin Care on
hüpoallergeenne ega sisalda parabene,
lõhnaaineid ega hormoone.

Koostisosad:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera geel
Arubalt), Aqua (Water), Glyceryl Stearate,
Cetearyl Isononanoate, Decyl Oleate,
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetyl
Alcohol, Stearyl Alcohol, Polysorbate 60,
Sorbitan Stearate, Butyrospermum Parkii
Butter (Shea Butter), Ceteareth-20, Bisabolol,
Propylene Glycol, Panthenol, Cetearyl Alcohol,
Cetyl Palmitate, Ceteareth-12, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Tocopheryl
Acetate (Vit. E), Simmondsia Chinensis Seed
Oil (Jojoba Oil), Ascorbic Acid (Vit. C), Disodium
EDTA.

Omadused:

- ALHYDRAN Cracked Dry Skin Care on niisutav
meditsiiniline kreem, mille peamine
koostisosa on värselt töödeldud aloe vera
geel. Kuna see toitev kreem sisaldab
erakordselt suures koguses aloe vera geeli,
on ALHYDRAN Cracked Dry Skin Care'il
tugevad niisutavad omadused.
- Kreem niisutab nahka kogu päeva ning on
rikastatud vitamiinide, looduslike õlide,
sheavõi, bisabolooli ja pantenooliga.
- Kõik koostisosad aitavad taastada, toita ja
pehmendada (väga) kuiva nahka.

Näidustused / kasutusvaldkonnad:

- Toetab (väga) kuiva naha ravi.
- Regulaarsel kasutamisel aitab ennetada ja
leevendada kuiva nahka.
- Aitab ennetada või vähendada kuivast
nahast tingitud ketendust.
- Toetab pingul tunduvat nahka, mis vajab
lisatoitmist.
- Toetab ketendava ja lõhenenud naha ravi.
- Toetab naha struktuuri, aidates ennetada
(väga) kuiva naha teket.

KASUTAMINE

Kasutamishüüsed:

- Kandke ALHYDRAN Cracked Dry Skin Care'i
nahale kaks kuni kolm korda päevas.
Vajaduse korral või kui nahk tundub kuiv,
kasutage sagedamini.
- Veenduge, et nahk oleks enne kreemi
pealekandmist puhas ja kuiv.
- ALHYDRAN Cracked Dry Skin Care'i võib
kasutada pikema aja vältel.
- Kui pärast mõnenädalast kasutamist ei ole
tulemus piisav, võtke ühendust
nahaspetsialisti, näiteks nahaterapeudi,
perearsti või dermatoloogiga.

OHUTUS JA SÄILITAMINE

Mitte kasutada, kui:

- teil on teadaolev allergia mõne koostisosa
suhtes;
- teil on avatud haavad või õmbluste järgsed
nahaperforatsioonid, mille korral nahk ei ole
veel kokku kasvanud;
- nahk on infitseerunud;
- teil esineb krooniline lööve või ärritus;
- laps on alla 3 kuu vanune.

Erihoiatused:

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Alla 6 kuu vanustel lastel kasutamisel
konsulteerige esmalt arstiga.
- Ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Vältige otsest kokkupuudet silmade ja
limaskestadega.
- Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
või toode on avatud.

Kõrvaltoimed:

Seni ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid. Kõigist
seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb
teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale
asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Säilitamine:

- Parim enne kuupäev on märgitud pakendile.
- Hoida temperatuuril alla 25 °C.
- Suure looduslike koostisosade sisalduse
tõttu, sealhulgas värsket aloe vera geel, võib
toode pärast avamist veidi muuta värvust või
konsistentsi. See ei mõjuta kreemi
nõuetekohast toimivust.

Läbivaatamise kuupäev:

september 2020



BAPMEDICAL
MEDICAL CARE FOR THE SKIN



BAP Medical B.V.
Laan van Westenek 64,
NL-7336 AZ Apeldoorn
www.bap-medical.com
Made in Aruba

Product Nr. 20-33050



IFU-ALH-20-33050-003

WWW.ALHYDRAN.COM