



meditsiiniline järelhooldus nahale

Parabeenivaba
Lõhnaainevaba



BAPMedical
Best Available Practices





IFU-ALH-010

WWW.ALHYDRAN.COM

EESTI

Nimetus:

ALHYDRAN, meditsiiniline niisutav kreem.

Toote kirjeldus:

Meditsiiniline niisutav kreem. Tagab optimaalse ja pikaajalise niisutuse ning aitab ennetada niiskuskadu. Sobib kahjustunud nahabarjääri hoolduse toetamiseks. Sobib põletushaavade järelhoolduseks, armide hoolduseks ja ennetamiseks, (väga) kuiva naha hoolduseks ning punetuse ja sügeluse vähendamiseks.

ALHYDRAN on hüpoallergeenne ega sisalda parabeene ega lõhnaaineid. Sobib kõikidele nahatüüpidele.

Koostisosad:

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Aloe Vera Gel from Aruba), Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Oleate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Isononanoate, Sorbitan Stearate, Ceteareth-20, Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Ceteareth-12, Cetyl Palmitate, Caprylyl Glycol, Chlorphenesin, Tocopheryl Acetate (Vitamin E Acetate), Ascorbic Acid (Vitamin C), Simmondsia Chinensis Seed Oil (Jojoba Oil), Disodium EDTA.

Omadused:

ALHYDRAN on meditsiiniline kreem, mille aluseks on värselt valmistatud Aloe Vera geel. Aloe Vera annab kreemile tugeva niisutava toime ning õrnuse, mis sobib eriti kahjustunud ja haavatavale nahale.

ALHYDRANi tootesarja ülejäänud koostisosad sisaldavad kvaliteetseid kosmeetilisi õlisid ja rasvu, mis toetavad toote üldisi niisutavaid omadusi. ALHYDRAN muudab naha pehmeks ja elastseks ning sobib eriti nahatüüpidele, mille elastsus on vähenenud. Toode on äärmiselt õrn ja seda taluvad väga paljud nahatüübid. ALHYDRAN ei määri ning on veega maha pestav.

NÄIDUSTUSED JA KASUTAMINE

Näidustused/kasutusvaldkonnad:

- Ägedate ja krooniliste haavade järgselt hiljuti paranenud naha järelhoolduseks.
- Kahjustunud naha järelhoolduseks, et aidata ennetada armistumist.
- Põletushaavadest tekkinud olemasolevate armide seisundi parandamiseks.
- Sügeluse ja valu ennetamiseks ning vähendamiseks kohe pärast naha sulgumist.
- Ekseemissümptomite vähendamiseks.
- Põletuste järelhoolduseks, eriti naha hooldamiseks vahetult enne ja pärast surverõivaste ja/või silikoonplaastrite kasutamist.
- Külmakahjustusest põhjustatud haavade järelhoolduseks.
- Ennetavaks nahahoolduseks onkoloogilise ja radioloogilise ravi ajal.
- Nahasiirikute ja nahasiirdamise doonorpiirkondade järelhoolduseks.
- Punetava või kuiva naha ja venitusarmide ennetavaks hoolduseks.
- Keemilise koorimise ja laserravi järgseks järelhoolduseks.
- Meditsiinilise ja kosmeetilise kirurgia järgseks järelhoolduseks.

Kasutamish juhised:

- Kandke ALHYDRAN õhukese ja ühtlase kihina nahale kolm korda päevas - hommikul, keskpäeval ja õhtul.
- Vajaduse korral võib ALHYDRANi kasutada piiranguteta aastaid.

OHUTUS JA SÄILITAMINE

Mitte kasutada, kui:

- mõne koostisosa suhtes tekkinud allergilise reaktsiooni korral;
- avatud haavadel või õmbluste järgselt nahaperforatsioonidel, mille korral nahk ei ole veel paranenud;
- nakatunud nahal;
- kroonilise lööbe või muu nahaärrituse korral;
- alla 3 kuu vanustel lastel.

Erihoiatused:

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Ainult välispideks kasutamiseks.
- Kasutada ainult paranenud ja sulgunud nahal, mitte avatud haavadel.
- Vältige otsest kokkupuudet silmade ja limaskestadega.
- Ärge kasutage toodet, kui pakend on transportimisel kahjustatud või avanenud.
- Alla 6 kuu vanustel lastel kasutamiseks konsulteerige esmalt arstiga.

Kõrvaltoimed:

Seni ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid. Kõigist seadmega seotud tõsistest juhtumitest tuleb teatada tootjale ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

Säilitamine:

- Kõlblikkusaeg on märgitud pakendile.
- Hoida temperatuuril kuni 25 °C.
- Suure looduslike koostisosade sisalduse tõttu, sealhulgas värske Aloe Vera geeli tõttu, võib toode pärast avamist veidi värvuda või muuta konsistentsi. See ei mõjuta kreemi nõuetekohast toimimist.

Kasutusjuhendi viimase läbivaatamise kuupäev:

juuni 2021