

Nimetus

BAPSCARCARE geel SPF 40

Tootekirjeldus

BAPSCARCARE geel SPF on E-vitamiiniga rikastatud silikoongeel ebanormaalsete armide, sealhulgas hüpertroofiliste ja keloidsete armide, raviks ja ennetamiseks. Samal ajal kaitseb geel kahjulike UVA- ja UVB-kiirte eest (SPF 40). BAPSCARCARE geel SPF-i võib kanda mis tahes nahapiirkonnale ning see sobib eriti hästi näo, kaela, liigeste ja nahavoltide armide raviks.

Koostis

Polysiloxanes, Caprylic/Capric Triglyceride, Titanium Dioxide, Cyclopentasiloxane, Zinc Oxide, Polyhydroxystearic Acid, Alumina, Stearic Acid, Triethoxycaprylylsilane, Vitamin E.

Omadused

- BAPSCARCARE geel SPF aitab muuta armid madalamaks, elastsemaks ja õhemaks ning vähendab vaevusi, nagu püsiv punetus, armi kiskumistunne, sügelus, liigeste liikumispiiratus, ebamugavustunne ja kosmeetilised häired.
- Geel moodustab naha pinnale pooloklusiivse ehk katva kihi, mis suurendab naha ehk epidermise niisutatust. Suurem niisutatus kiirendab kahjustunud armikoe taastumist ja vähendab vaevusi.

Näidustused / kasutusvaldkonnad

BAPSCARCARE geel SPF ühendab armiravi ja päikesekaitse ning sobib kasutamiseks nii vanadel kui ka uutel armidel järgmistel eesmärkidel:

- ebanormaalsete armide, sealhulgas hüpertroofiliste ja keloidsete armide, ravi ja ennetamine;
- põletusarmide ravi;
- kirurgiliste armide ravi;
- armist põhjustatud püsivate funktsionaalsete probleemide ravi, sealhulgas püsiv punetus, armi kiskumistunne, sügelus, liigeste liikumispiiratus, ebamugavustunne ja kosmeetilised häired.

Päikesekaitsefaktor SPF 40

Päikesevalgus on tervisele vajalik, kuid võib olla ka potentsiaalselt ohtlik. Päikesevalguses on kahte tüüpi kiiri: UVB- ja UVA-kiired. Liigne kokkupuude UVB-kiirtega võib põhjustada päikesepõletust. Liigne kokkupuude UVA-kiirtega kiirendab naha vananemist ning võib põhjustada päikeseülitundlikkust ja hüperpigmentatsiooni, näiteks melasmat või pigmendilaike. Mõlemad kiirguse vormid võivad mõjutada raku DNA-d ja pikaajaliselt soodustada nahavähi teket. Arme tuleb alati kaitsta päikese kahjulike kiirte eest. BAPSCARCARE geel SPF aitab armi ennetada või ravida ning kaitseb samal ajal kahjulike UVA- ja UVB-kiirte eest.

Kasutusjuhend

- Parima tulemuse saavutamiseks alustage BAPSCARCARE geel SPF-i kasutamist eelistatult kohe pärast haava sulgumist, st pärast õmbluste eemaldamist ja võimalike koorikute kadumist.
- Keerake tuubilt kork maha ja eemaldage tuubi otsikult kaitsekile.
- Enne kasutamist puhastage nahk ja laske sellel kuivada.

- Kandke geel õhukese kihina peale kaks korda päevas. Nahale võib jääda nähtav valge kiht. Vajaduse korral võib selle sisse hõõruda.
- Pärast kasutamist keerake kork tuubile tagasi.
- Pärast intensiivset tegevust, näiteks sportimist, ja pärast kokkupuudet veega, näiteks duši all käimist või ujumist, kandke BAPSCARCARE geel SPF uuesti peale.
- Soovi korral võib pärast geeli kuivamist kasutada BAPSCARCARE geel SPF-i koos jumestusega.

Päikese käes viibimisel

- Kandke geel peale piisavalt varakult enne päikese kätte minekut.
- Kandke geeli regulaarselt uuesti peale, iga 2 tunni järel. Eriti pärast ujumist, sportimist ja naha kuivatamist.
- Vältige intensiivset keskpäevast päikest ajavahemikus 11.00-15.00.
- Lisakaitseks kandke nahka katvaid riideid: mütsi, T-särki ja päikeseprille.
- Hoidke imikud ja väikelapsed alati otsese päikesevalguse eest kaitstult.

Kui kaua tuleb BAPSCARCARE geel SPF-i kasutada?

- Armi normaliseerumine võtab vähemalt 3-6 kuud.
- Kasutage BAPSCARCARE geel SPF-i seni, kuni arm on kõrgem, punane või põhjustab vaevusi.
- Ravi kestuse osas pidage nõu terapeudi või arstiga.

Kasutamise kestus

- Õigel kasutamisel jätkub ühest tuubist mitmeks ravinädalaks.
- Kasutamise kestus sõltub ravitava armi suurusel ja päikesega kokkupuute hulgast.
- Pikaajalise ravi korral võib seetõttu olla vaja mitut pakendit.

Eriline tähelepanu ja ettevaatusabinõud

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Vältida kokkupuudet silmade ja limaskestadega.
- Silikoongeel sobib ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Kasutage silikoongeele ainult paranenud ja sulgunud nahal, pärast kooriku kadumist, ning mitte kunagi avatud haavadel.
- Mitte kasutada ülitundlikkuse korral mõne koostisosa suhtes.
- Mitte kasutada, kui toote kättesaamisel on pakend kahjustunud.

Kõrvaltoimed

- Harvadel juhtudel võib nahk silikoonravi suhtes tundlikult reageerida ja tekkida nahaärritus. Sellisel juhul katkestage ravi ajutiselt.
- Vajaduse korral saab BAPSCARCARE geel SPF-i eemaldada õrna ja nahasõbraliku seebiga.
- Alustage ravi uuesti niipea, kui nahaärritus on taandunud.
- Kui nahaprobleemid püsivad, pidage nõu terapeudi või arstiga.
- Kõik tootega seotud tõsised vahejuhtumid tuleb teatada tootjale ja kasutaja asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

Säilitamine

- Kõlblikkusaeg on märgitud pakendile.

- Pärast avamist võib toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.
 - Hoida toatemperatuuril või vähemalt mitte temperatuuril üle 25 °C.
- Kasutusjuhendi viimase läbivaatamise kuupäev**
Jaanuar 2021

BAPSCARCARE

GEL

silicone therapy
for scars

Scar treatment

SPF
40

UVB + UVA

Silicone gel



BAPMEDICAL
MEDICAL CARE FOR THE SKIN

MADE IN
BELGIUM

BAP Medical B.V.
Laan van Westenenk 64,
NL-7366 AZ Apeldoorn.
www.bap-medical.com

CE MD
MEDICAL DEVICE

BSC-IFU-GELSPF-006

WWW.BAPSCARCARE.COM