



Nimetus:

Scarban Velvet Touch silikoongeel.

Tootekirjeldus:

Scarban Velvet Touch on silikoongeel armide, sealhulgas hüpertroofiliste ja keloidsete armide, raviks ning ebanormaalse armkoe tekke ennetamiseks pärast operatsiooni või õnnetust.

Koostis:

Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane.

Omadused:

- Scarban Velvet Touch silikoongeel aitab muuta armid madalamaks, siledamaks ja õhemaks ning vähendab vaevusi, nagu püsiv punetus, armi kiskumistunne, sügelus, liigeste liikumiskiiratus, ebamugavustunne ja kosmeetilised häired.
- Scarban Velvet Touch silikoongeel on läbipaistev geel, mis kuivab tänu unikaalsele koostisele kiiresti ega jäta nahale kleepuvat tunnet.
- Geel moodustab nahale pooloklusiivse katva kihi, mis suurendab naha ehk epidermise niisutust. Suurem niisutatus aitab kahjustunud armistunud nahal kiiremini taastuda ja vähendab vaevusi.

Näidustused / kasutusvaldkonnad:

Scarban Velvet Touchi võib kasutada nii vanadel kui ka uutel armidel järgmistel eesmärkidel:

- ebanormaalsete armide, sealhulgas hüpertroofiliste ja keloidsete armide, ravi ja ennetamine;
- põletusarmide ravi;
- kirurgiliste armide ravi;
- armist põhjustatud püsivate funktsionaalsete vaevuste ravi, sealhulgas püsiv punetus, armi kiskumistunne, sügelus, liigeste liikumiskiiratus, ebamugavustunne ja kosmeetilised häired.

Enne ja pärast kasutamist

- Keerake tuubilt kork maha või eemaldage pudelilt kork.
- Tuubi kasutamisel lõigake enne kasutamist tuubi ülemine ots kääridega lahti.
- Pärast kasutamist pange kork tuubile või pudelile tagasi.

Kasutusjuhend:

- Parima tulemuse saavutamiseks alustage Scarban Velvet Touch silikoongeele kasutamist eelistanult kohe pärast haava sulgumist, pärast õmbluste eemaldamist ja võimalike koorikute kadumist.
- Enne kasutamist puhastage nahk ja laske sellel kuivada.
- Üheks kasutuskorrale piisab väikesest kogusest silikoongeelist. Optimaalse ravi saavutamiseks kandke väike kogus silikoongeele armile kaks korda päevas sujuva liigutusega.
- Pärast intensiivset tegevust, näiteks sportimist, ja pärast kokkupuudet veega, näiteks duši all käimist või ujumist, kandke Scarban Velvet Touch silikoongeel uuesti peale.
- Soovi korral võib pärast kuivamist kasutada Scarban Velvet Touch silikoongeele koos jumestusega.

Kui kaua tuleb Scarban Velvet Touch silikoongeele kasutada?

- Armi normaliseerumine võtab vähemalt 3-6 kuud.
- Kasutage Scarban Velvet Touch silikoongeele seni, kuni arm on kõrgem, punane või põhjustab vaevusi.
- Ravi kestuse osas pidage nõu ravi teostava spetsialisti või arstiga.

Kasutamise kestus:

- Õigel kasutamisel jätkub ühest tuubist või pudelist mitmeks ravinädalaks.
- Kasutamise kestus sõltub ravitava armi suurusest.
- Pikaajalise ravi korral võib seetõttu olla vaja mitut pakendit.

Eriline tähelepanu ja ettevaatusabinõud:

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Vältida kokkupuudet silmade ja limaskestadega.
- Silikoongeel sobib ainult välispidiseks kasutamiseks.
- Kasutage silikoongeele ainult sulgunud nahal, pärast kooriku kadumist, ja mitte kunagi avatud haavadel.
- Mitte kasutada ülitundlikkuse korral mõne koostisosa suhtes.
- Mitte kasutada, kui toote kättesaamisel on pakend kahjustunud.

Kõrvaltoimed:

- Harvadel juhtudel võib nahk silikoonravi suhtes tundlikult reageerida ja tekkida nahaärritus. Sellisel juhul katkestage ravi ajutiselt.
- Vajaduse korral saab Scarban Velvet Touchi eemaldada õrna ja nahasõbraliku seebiga.
- Alustage ravi uuesti siis, kui nahaärritus on taandunud.
- Kui nahaprobleemid püsivad, pidage nõu ravi teostava spetsialisti või arstiga.
- Kõik tootega seotud tõsised vahejuhtumid tuleb teatada tootjale ja kasutaja asukohariigi pädevale asutusele.

Säilitamine:

Kõlblikkusaeg on märgitud pakendile.

Kasutusjuhendi viimase läbivaatamise kuupäev:

Jaanuar 2024